

 NORDKAPP KOMPETANSE OG SIKKERHETSSENTER				Dok.id.: .02.01.5.30
Prosedyre for bruk av Sim Man ALS				Prosedyre
Utgave: 3.00	Skrevet av: Tone Pedersen	Gjelder fra: 13.03.2026	Godkjent av: Kjell Åge Meyer	Side: 1 av 2

Definisjon

Prosedyren gir retningslinjer for gjennomføring av praktiske øvelser med Sim Man.

Formål

Forebygge at person og materiellskader inntreffer ved bruk av Sim Man.

Målgruppe

Alle kursdeltakere og instruktører som deltar på førstehjelpsmoduler hvor Sim Man benyttes.

Beskrivelse

Gjennomføring av praktiske førstehjelpsøvelser:

- Minimum 1 instruktør til stede på praktiske øvelser
- Instruktør skal påse at Sim Man er koblet opp på korrekt internett og oppladet i forkant av kurset.
 - Kontrollteste alle enhetene tilhørende Sim Man før kursstart.
 - Ved forflytning av Sim Man skal tilhørende bære brukes.
 - Ved forflytning fra bære til annet underlag skal det være minimum 2 stk, OBS; Sim Man veier 60kg.
 - Ved stikk/kanylering brukes andre øvingsobjekter enn Sim Man.
 - Ved feil eller mangler rapporteres det umiddelbart til nærmeste leder.

Ved uhell, akutt skade eller sykdom skal instruktør som er medisinsk personell vurdere alvorlighetsgrad og varsle deretter etter standard prosedyre, 116 117 eller 113.

Kryssreferanser

Eksterne referanser

[24 3.3 Verifisering og validering av utvikling](#)
[26JQSJS 7.1 HMS-planer og prosedyrer](#)
[2.7.8 Sikkerhet og vedlikehold](#)

Prosedyre for bruk av Sim Man ALS	Dok.id.: .02.01.5.30
	Side : 2 av 2